

アスピブナン(ハブ毒吸引器)の使用法

※本品の使用はどこまでも応急処置であると考え、出来るだけ迅速に医師の手当を受けることが肝心です。

1. 傷口に最も適した大きさの吸盤を選び、本体に取り付けて下さい。
2. ピストンを完全に引き上げ、吸盤を傷口が中央にあたるように押し当てて下さい。
3. 吸盤を密着させたまま、ピストンを最後まで押し下げ、1～2分間そのまま吸引の状態を保っていると毒物が吸い出されます。尚、繰り返し吸引を行なって下さい。
4. 静かにピストンを再び引き上げると、吸盤は自然に傷口から離れます。最後に傷口を消毒してください。




① 咬まれた部位によってパーツが4種類あります。



② 吸い取る前の様子



③ 中の棒を最後まで押します

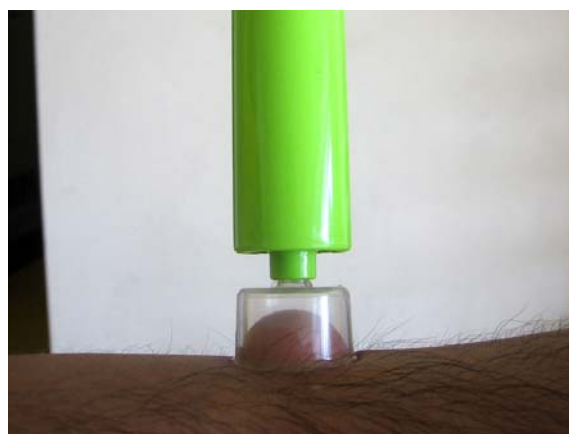

④ 吸引部の中が真空状態になり吸い出します。吸引力は皮膚がもりあがる程強力です。

アスピブナン使用上の注意

1. 手当を済ませたら、アスピブナンのカップを外し、ついている毒液を全部洗い流し、カップを消毒して下さい。但し、「アスピブナン」の本体は洗わないで下さい。本体内部のメカニズムを濡らしたり、プラスチックシリンダーに亀裂が生じると吸引力がなくなり、使用できなくなります。
2. まぶたや唇など皮膚の敏感な所には使用しないで下さい。
3. 本品は子どもの手の届かない所に保管して下さい。
4. 高温になる場所に長時間放置すると内部のメカニズムが破損する事があります。
5. 血液感染のおそれがありますので、共用は避けて下さい。